

BIPOLAR CUP

バイポーラ カップ



Exactech® バイポーラ カップ


AcuMatch L-Series

- シンプル構造で容易に組み立て、および、取り外しが可能です。
- ポリライナー&カップ一体型デザインを採用し、ポリエチレンの耐久性を高めています(内径28mmカップ)。
- 確実なロッキングメカニズムにより、インナーヘッドの脱転を防止します。
- 荷重に対して常にニュートラルポジションを保つセルフセンタリング機構により、寛骨臼、ポリライナーへの理想的な荷重分散、および、脱臼防止効果が得られます。
- 精巧にマシニングされた鍛造コバルトクロム合金製カップにより、寛骨臼へ正確に適合し、軟骨の摩耗を最小限に抑えます。



組み立て方法(内径28mmカップ)

- 1 保護クリップを取り外し、廃棄します。ポリエチレンのロッキングリングも取り外します(図1)。
- 2 フェモラルヘッドをバイポーラカップ内に装填します(図2)。
- 3 ロッキングリングを元に戻します(図3)。
- 4 バイポーラ アッセムブリ プライヤーにバイポーラカップをセットし、パチンと音がしてロックするまで圧迫を加えます(図4)。
- 5 バイポーラカップ内のフェモラルヘッドを転がしてステム接続部(穴)を露出させ、ステムに装着します(図5)。最後にヘッドインパクトで打ち込んで固定します。

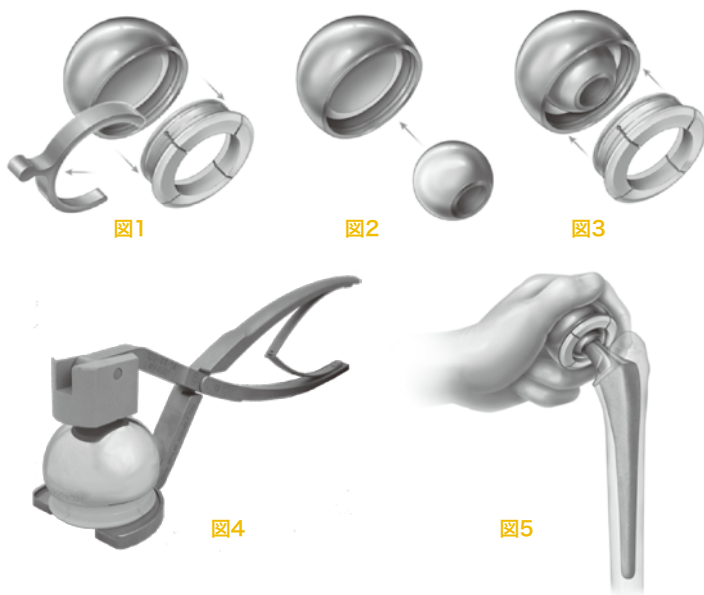

注1) バイポーラ カップへのフェモラルヘッドの組み立ては、器械出し用のトレー上で行います。より簡便な組み立て方法は、保護クリップを外さずに、バイポーラカップを全く分解しないままの状態、徒手にてフェモラルヘッドを押し込みます。

注2) 内径22mmカップは、ライナーとメタルシェルの一体型ではなく、組み立て方法が異なります。詳細は、Novationヒップシステムの手術手技書に記載されていますのでご参照ください。

規格	カタログ No.	サイズ/外径 (mm)	
内径 22mm	100-22-38	38	※
	100-22-39	39	※
	100-22-40	40	※
	100-22-41	41	※
ライナー 22mm	100-22-42	42	※
	100-22-19	外径38~39用	※
内径 28mm (ライナー 一体型)	100-22-20	外径40~42用	※
	BP-2840	40	
	BP-2841	41	
	BP-2842	42	
	BP-2843	43	
	BP-2844	44	
	BP-2845	45	
	BP-2846	46	
	BP-2847	47	
	BP-2848	48	
	BP-2849	49	
	BP-2850	50	
	BP-2851	51	
	BP-2852	52	
BP-2853	53		
BP-2854	54		
BP-2855	55		

注1: 内径22mmのバイポーラカップは、ライナー(付属品)が別梱包になっております。

注2: ※印はオプションサイズですのでお問い合わせください。

製造販売元

イグザクテック株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿兒島ビル8F
Tel: 03-6262-0880 Fax: 03-6262-0820

Exactech®

販売名 NOVATION セメントヒップシステム
承認番号 22400BZX00325000
販売名 NOVATION ヒップシステム
承認番号 22200BZX00522000
販売名 アクスマッチ人工股関節・Cシリーズ
承認番号 21300BZY00642000
販売名 Novation Crown カップシステム
承認番号 22900BZX00064000
販売名 HIP手術器械4
届出番号 13B1X10054EX1023

711-12-13